

こんなときにはAED!!

●意識がない ●呼吸がない ●脈拍なし（医療従事者のみ）

① ふたを開けると、電源ON！



「意識・呼吸を確認してください。
胸を裸にして、AEDのふたから
四角い袋を取り出してください。
袋を破いてパッドを取り出してください。
パッドの一つをシートから剥がして、
図のように右胸に貼ってください。
もう一つのパッドをシートから剥がして、
左わき腹に貼ってください。」

重要

使う前には
ここをチェック！



② 電極パッドを体に貼ります。

左右どちらでもOK。



電極パッドを貼ると、
自動的に心電図の解析を開始します。
あとは器械(AED)の音声の指示に従って下さい。

「体に触らないでください。
心電図を調べています。」

電気ショックが必要な心電図の場合

「電気ショックが必要です。
充電しています。」

電気ショックが不要な心電図の場合

「体に触っても大丈夫です。
直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を
始めてください。」

③ 放電ボタンを押します。



「体から離れてください。
点滅ボタンをしっかりと
押してください。」

「電気ショックを行いました。
体に触っても大丈夫です。
直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を
始めてください。」

胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を
交互に2分間行います。



普段どおりの呼吸が戻った場合は、身体を横向きにして救急隊員の到着を待ちます。
(電極パッドは付けたままにして下さい。)

